

# ULS-PACK

Agulha de extração de osso para obtenção de enxerto autólogo.



Kit de cânulas ULS-PACK permite a remoção de uma amostra osteomedular da crista ilíaca, com baixa invisibilidade para o paciente evitando a manobra de deslocamento quando a amostra esta sendo retirada, obtendo um enxerto ósseo autólogo com propriedades osteocondutora, osteoindutivas e osteogênicas, podendo também ser usada essa amostra para biopsias.

## CARACTERÍSTICAS:


- O estilete de ponta “Trocar” garante uma rápida e não traumática penetração.
- A manga ergonômica melhora a aderência e a precisão da operação.
- Com o conector Luer-Lock universal, pode ser conectada qualquer seringa de aspiração (de precisar)
- A ponta ultra-afiada do estilete ULS-PACK facilita a remoção de um fragmento intacto osteo medular.

## TÉCNICA CIRÚRGICA:

1. Insira a agulha, com o estilete perpendicular à superfície do osso.
2. Avance girando a agulha para a direita e para a esquerda e ao mesmo tempo empurre até encontrar a mínima resistência (que indica a entrada na cavidade medular).
3. Retire o estilete, introduza a tampa na empunhadura da agulha e avance no canal medular cerca de 2 cm.
4. Remova a tampa da empunhadura e introduza o estilete ULS-PACK antiluxação, gire todo o dispositivo 360° duas vezes para cortar internamente o fragmento de tecido sem danos e evitando seu deslocamento.
5. Remova o estilete e coloque a tampa na empunhadura, de seguida remova a cânula.
6. Para obter a amostra osteo medular que esta dentro da cânula, insira o dispositivo de proteção para os dedos e o extrator no lado oposto da cânula para retirar o enxerto autólogo.



Distribuido por **LEALMEDICAL**

 TEL: +55 (11) 5199-7612.

+55 (11) 94833-1795/ +55 (11) 98994-4059.

 @lealmedical

 [www.lealmedical.com](http://www.lealmedical.com)

 [comercial@lealmedical.com](mailto:comercial@lealmedical.com)

Av.Copacabana 268. Empresarial 18 do Forte,Sala 502/503/1302.  
Alphaville-Barueri-SP. CEP: 06472-001.